

Návod na použití masážního lehátka

Návod na sestavení masážního lehátka

1. Otevřete obě spony a rozložte lehátko. Zamezte otevírání lehátka na drsném podkladě, aby se nepoškodilo.
2. Směrem od Vás lehátko rozevřete.
3. Postavte lehátko, přitom je držte za rám a chodidlem zafixujte nohy, aby při narovnání neuklouzly.
4. Postavte lehátko
5. Nastavte výšku lehátka dřevěnými knoflíky ve spodní části noh. Knoflíky vždy pevně utáhněte.
UPOZORNĚNÍ: Výšku nastavujte vždy bez zatížení!
6. Sklápěcí nohy rukou lehce podlomte a stůl narovnejte.
7. Pro lepší ochranu čalounění můžete vložit lehátko do ochranného obalu nebo do přepravní tašky.

Manipulace s podpěrou hlavy

8. Podpěru hlavy zasuňte do obou otvorů na čelní straně.
Zatížení podpěry je max. 7 kg (váha hlavy).

Montáž podpěry paží

9. Podpěru zavěste za delší popruh (bez zapínání) přes obě madla hlavové podpěry (čalouněním nahoru)
10. Provlečte rozepnuté popruhy dřevěnou podložkou pod čaloun. límcem (čelní stranou) a zapněte trojzubec
11. Než srovnáte podpěru do vodorovné polohy, můžete upravit délku popruhu.

UPOZORNĚNÍ

- maximální pracovní zatížení 250 kg
- povrch čalounění omývejte neutrálním mýdlem nebo desinfekčním prostředkem s max. 30 % obsahem alkoholu.